

ウイルスなどによる

嘔吐物

使い捨て

処理キット



嘔吐物の飛沫から身を守るためのグッズがひとつに!

正しい処理で二次感染をしっかりと予防

セット内容

チリトリ×2枚(紙)

●紙製のオリジナルチリトリです。
組立てが簡単で使い捨てに最適。

処理用ビニール袋
黒(中)/白(大)

ペーパータオル
輪ゴム×2本

手袋(ニトリル)

●作業中に外れる事のないニトリル製で
ご用意しました。

シューズカバー(ポリエチレン)

●靴に着くことを避けます。

帽子(不織布)

●頭髪への付着を防ぎます。

マスク(不織布)

長袖エプロン(ビニール製)

●作業中に衣服への付着を
避けます。

リバース^{消臭}クリーン

●このセットの要です。
嘔吐物を速やかに固め異臭も
瞬時に閉じ込めます。

使い回しはダメ!必ず使用後は正しい方法で廃棄してください。

※セット内容の仕様については告知無く変更する場合もございます。

嘔吐物処理キットを使用したマニュアルです





まず最初に

- 用意するもの
 ✓「嘔吐物処理キット」
 ✓ペーパータオル ✓バケツ
 ✓消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）
 ✓ゴミ袋

帽子、マスク、エプロン、手袋、シューズカバーを装着し、チリトリを組み立てます。

紙製チリトリ組み立て方

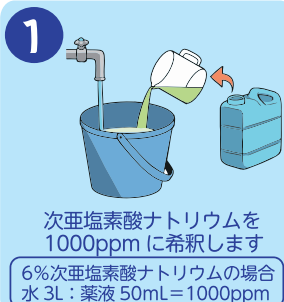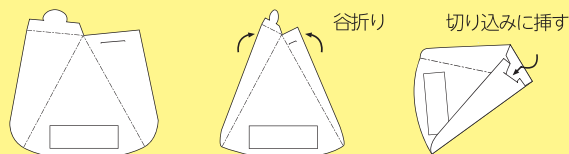

次亜塩素酸ナトリウムを1000ppmに希釈します
 6%次亜塩素酸ナトリウムの場合
 水 3L : 薬液 50mL = 1000ppm





嘔吐物にリバース消臭クリーンを散布します



チリトリで嘔吐物とリバース消臭クリーンを除去し、内袋（黒色）に入れて密封し、外袋（白色）に捨てます。


4

嘔吐物のあった場所と、その周りの半径2mの円周をペーパータオルで覆います。ペーパータオルの上から円のように消毒液をかけ、床をふき取りながら中心に集めます。

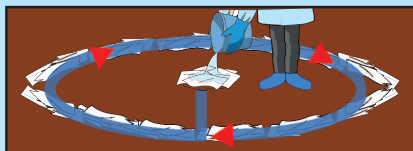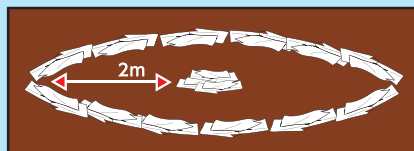


5

集まったペーパーを外袋に捨てます。中心部は消毒液に10分以上接触させてから捨てます。ペーパーの円から出る時に、ペーパー上でシューズカバーを脱ぎ外袋に捨てます。

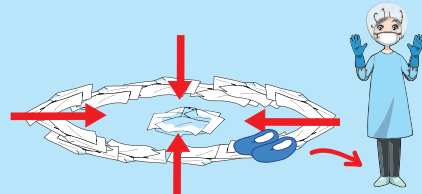

6

手袋→帽子→マスク→エプロンの順で保護具を脱ぎ外袋に捨てます。外袋に消毒液を入れ、密封して廃棄します。

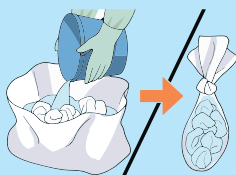

7

アルタン NA ハンドソープで手を十分に洗い、うがいをします。



8

処理した場所の周辺にアルタン ノロエースを噴霧し拭き取ります。



規格【Specification】



内 容 処理セット&
 リバース消臭クリーン1袋
 サイズ 300×215×25
 JAN 4971470113285
 入り数 20セット/ケース

セット内容

- ①帽子(不織布)②マスク③手袋(ニトリル)
- ④袖付きエプロン(ポリエステル)
- ⑤シューズカバー(ポリエステル)
- ⑥紙製チリトリ2枚⑦ペーパータオル⑧輪ゴム
- ⑨ビニール袋(黒)⑩ビニール袋(白)
- ⑪リバース消臭クリーン

※アルタンNAハンドソープならびにアルタンノロエースは別途お買い求めください。

アルタンのウイルス対策商品 ラインナップ



アルタンノロエース

アルタン
NAハンドソープ

リバース
消臭クリーン



現場の声をカタチに...いつもアルタンから。

アルタン株式会社

〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-11-10
 TEL:03(3743)5705 FAX:03(3743)5706
 ホームページ www.altan.co.jp